


Carrelli odontoiatrici

Prophy 700



Jelly

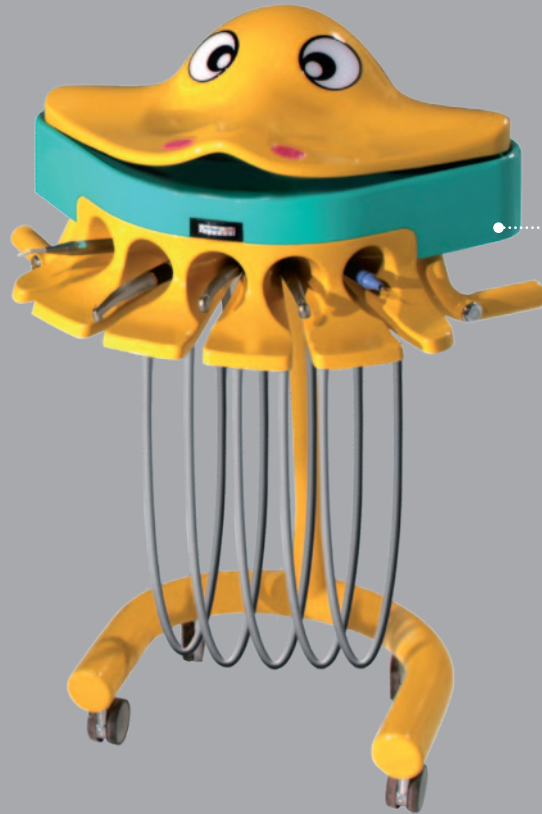

Dal design elegante ed ergonomico, il supporto mobile a carrello Prophy 700 consente una totale libertà di movimento. La tavoletta a cordoni pendenti è personalizzabile fino a cinque strumenti a scelta tra elettrici o ad aria. Estremamente leggero si sposta senza intralci, garantendo un'interazione coordinata tra medico e assistente. Una novità unica nel suo genere è Jelly, il nuovo carrello odontoiatrico dedicato ai piccoli pazienti. Come insegnano gli psicologi, le prime esperienze di un bambino sono determinanti per il suo sviluppo comportamentale. Questo carrello, con la sua simpatica forma a medusa, è percepito dai bambini come un gioco: il bambino assocerà la visita a un divertimento, non avrà paura e intuirà che ha davanti un amico di cui fidarsi! Grazie al loro essere indipendenti, non fermeranno il tuo lavoro in caso di avaria del tuo riunito.



Tutti i comandi principali sono a portata di "piede", grazie al pedale a pressione semiproggressivo in dotazione. È dotato di funzione aria drive e acqua spray degli strumenti, inversione di marcia del micromotore e infine la funzione Endo dell'ablatores.



Come optional è possibile sostituire il pedale semiproggressivo in dotazione con quello con comando FED.FEC. La pedaliera dispone di un comando di azionamento progressivo degli strumenti. È dotata inoltre di un comando per l'inversione di marcia del micromotore o la funzione Endo dell'ablatores. L'azionamento degli spray agli strumenti può essere inserito sempre oppure, all'occorrenza, premendo la leva sottostante. Codice DE3.12FM



Il basamento in policarbonato satinato è un optional installabile in entrambi i modelli dei nostri carrelli. Grazie a questo strumento potrai appoggiare il pedale e muoverti con comodità. Codice 0550325



Nella testa della medusa alloggia un negatoscopio incorporato e uno spazio tray con un'ampia superficie di appoggio di 480x570mm.



Come optional è possibile ordinare il portastrumenti in ABS da posizionare sopra la faretra di Prophy 700. Sviluppa una dimensione di 375 x 275 mm. Codice DE2.00M



Per il funzionamento dei carrelli occorre semplicemente una presa d'aria e una presa a bassa tensione, due fonti che si trovano in tutti i riuniti dentali.

Scheda tecnica e dotazioni

	Jelly Codice DE800KP	Prophy 700 Codice DE700E	Codice optional
Alimentazione aria	6/8 bar	6/8 bar	
Alimentazione elettrica	24/220V-50 Hz	24/220V-50 Hz	
Dimensioni	60 x 100 x 55 cm	500 x 500 x 900 cm	
Peso	22,5 Kg	15 Kg	
Siringa Luzzani® Minimate in acciaio	●	●	
Cordone per turbina	●3	●3	
Kit micromotore elettrico fibra ottica	Optional	Optional	Codice PM504FM
Ablatore piezoelettrico compatibile Ems® 5° strumento	Optional	Optional	Codice AG046BM
Ablatore piezoelettrico compatibile Satelec® 5° strumento	Optional	Optional	Codice AG055SM
Ablatore piezoelettrico Piezo One led 5° strumento		Optional	Codice AG047FM
Lampada polimerizzatrice led	Optional	Optional	Codice DEL1.01WM
Pedale a pressione semiprogressivo	●	●	
Pedale progressivo Feed Fec	Optional	Optional	Codice DE3.12FM
Bottiglia acqua spray 100 cl	●	●	
Kit valvole commutazione acqua rete/bottiglia	Optional	Optional	Codice PC1866AM
Basamento in policarbonato satinato	Optional	Optional	Codice 0550325
Tavoletta tray magnetica		Optional	Codice DE2.00M
Negativoscopio	●		
Garanzia	24 mesi	24 mesi	